


Pre-Finisher[®]

PREFORMED FINISHING APPLIANCE

正位矫治器患者册

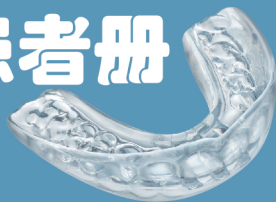

美丽笑容 重新绽放

Pre-Finisher[®]

PREFORMED FINISHING APPLIANCE

Pre-Finisher正位矫治器初次佩戴

佩戴前先将Pre-Finisher放在40°C-50°C热水中浸泡30秒左右，柔软性会更好，便于佩戴。初次佩戴Pre-Finisher时，最好对着镜子，按医生的指示，先佩戴上颌部分，咬入下颌，有时需要用手指拉伸调整一下。随着牙位的逐渐理想化，Pre-Finisher的摘戴会越来越容易。

Pre-Finisher正位矫治器咬合佩戴

您正确佩戴Pre-Finisher后，必须进行咬合训练，积极主动地咬紧Pre-Finisher。使上下颌紧咬在Pre-Finisher的牙窝内，尽可能长时间咬合。如果您不能坚持继续咬紧，可以放松下颌，但不要张开嘴。您越能积极主动的进行咬合训练，您的牙齿调整得越快越好。



咬合训练是指咬紧5秒放松3秒，尽可能多的重复这个过程。

推荐佩戴时间表

周期	佩戴时间
前2周	白天4小时咬合佩戴 + 整晚佩戴
接下来4周	白天3小时咬合佩戴 + 整晚佩戴
接下来6周	白天2小时咬合佩戴 + 整晚佩戴
接下来3个月	白天1小时咬合佩戴 + 整晚佩戴
6个月后	整晚佩戴

白天连续佩戴时间不少于1小时 / 次

特殊病例请遵医嘱

Pre-Finisher正位矫治器的清洗

为保持Pre-Finisher的洁净，使用后你只需需用皂类清洁剂仔细刷洗即可。请勿将Pre-Finisher放进沸水或洗碗机中清洗。



如您佩戴明显不适或摘除困难，请及时联系您的医生。

每日功课

热水浸泡



咬入口中
上下牙嵌入牙窝



白天咬合训练
咬紧 5 秒放松 3 秒



整晚佩戴



佩戴表填写说明：

下表中白天佩戴请填写时间；整晚佩戴和咬合训练填写完成情况：完成打“√”，未完成打“x”。

第 1 周

佩戴情况	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
白天佩戴 (小时)							
整晚佩戴							
咬合训练							

第 2 周

佩戴情况	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
白天佩戴 (小时)							
整晚佩戴							
咬合训练							

第 3 周

佩戴情况	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
白天佩戴 (小时)							
整晚佩戴							
咬合训练							

第 4 周

佩戴情况	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
白天佩戴 (小时)							
整晚佩戴							
咬合训练							

第 5 周

佩戴情况	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
白天佩戴 (小时)							
整晚佩戴							
咬合训练							

第 6 周

佩戴情况	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
白天佩戴 (小时)							
整晚佩戴							
咬合训练							

第 7 周

佩戴情况	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
白天佩戴 (小时)							
整晚佩戴							
咬合训练							

第 8 周

佩戴情况	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
白天佩戴 (小时)							
整晚佩戴							
咬合训练							

第 9 周

佩戴情况	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
白天佩戴 (小时)							
整晚佩戴							
咬合训练							

第 10 周

佩戴情况	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
白天佩戴 (小时)							
整晚佩戴							
咬合训练							

第 11 周

佩戴情况	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
白天佩戴 (小时)							
整晚佩戴							
咬合训练							



正确佩戴和咬合训练很重要哦!

第 12 周

佩戴情况	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
白天佩戴 (小时)							
整晚佩戴							
咬合训练							

第 13 周

佩戴情况	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
白天佩戴 (小时)							
整晚佩戴							
咬合训练							

第 14 周

佩戴情况	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
白天佩戴 (小时)							
整晚佩戴							
咬合训练							

第 15 周

佩戴情况	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
白天佩戴 (小时)							
整晚佩戴							
咬合训练							

第 16 周

佩戴情况	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
白天佩戴 (小时)							
整晚佩戴							
咬合训练							

第 17 周

佩戴情况	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
白天佩戴 (小时)							
整晚佩戴							
咬合训练							



您越能积极主动的进行咬合训练,您的牙齿调整得越快越好!

第 18 周

佩戴情况	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
白天佩戴 (小时)							
整晚佩戴							
咬合训练							

第 19 周

佩戴情况	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
白天佩戴 (小时)							
整晚佩戴							
咬合训练							

第 20 周

佩戴情况	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
白天佩戴 (小时)							
整晚佩戴							
咬合训练							



恭喜您！完成了 Pre-Finisher 正位矫治器的佩戴！



TP Orthodontics, Inc.

美国总部: 100 Center Plaza
La Porte, IN 46350-9672 USA
800-348-8856
www.tportho.com

中国公司: 托博正畸器械(无锡)有限公司
江苏省无锡市蠡园经济开发区标2二楼
邮编 214072
电话 0510-85163367-9000
传真 0510-85165272
www.tportho.asia

