



CLICK-IT

CLICK-IT



您可登陆 www.tportho.asia 或拨打
0510-85163367 了解更多详情!

CLICK-IT

一切尽在掌握

这款陶瓷自锁托槽可在治疗的各个阶段提供持续不间断的非凡表现。



Innovators of Personalized Color-Matching Technology®

CLICK-IT为何与众不同



Click-It是隐形的自锁托槽系统，独特的设计使您和您的患者体验更高的治疗满意度和治疗效率。

01 各个阶段，尽在掌控

Click-It托槽槽沟独特的四壁式设计使弓丝与槽沟的配合达到最佳，可针对治疗阶段的不同需求作出调整，使整个矫治过程更简易、正畸治疗过程更轻松简单。患者的治疗也可按照计划逐步进行。



02 快速、简单的弓丝更换

使用专用工具轻松打开锁盖，且不会产生单向力，指腹轻按即可关闭。减少您的临床诊疗时间，同时减少患者不适。



03 突破性美观设计

整体陶瓷外观，表面看不到任何的金属部件。专利的个性化牙色配比技术[®]，使托槽完美融入任何患者的牙色，确保患者在治疗期间和治疗之后都光彩照人。



04 干净、安全的拆除

独特的聚合网筛底板避免陶瓷与牙釉质直接接触，可确保托槽拆除时患者的安全和舒适。



自锁托槽助您

轻松掌握各个治疗阶段

Click-It采用独特的四壁式弓丝槽沟，可根据矫治目标的不同进行调整，适用于各种治疗方案并达到患者期望的效果，确保治疗的每个阶段都有非凡的表现。

阶段 1



速度更快

四壁式弓丝槽沟使Click-It能更快速的完成排齐、整平

- 托槽被动锁住尺寸为0.022"的正畸丝
- 避免弓丝在槽沟中滑动时不良或过度的转矩
- 槽沟与弓丝的空隙缓和了弓丝的力量，从而减少患者的不适（图1和2）



图 1



图 2

阶段 2



矫治效率更高

独有的弹簧片使Click-It矫正更快速。

- 槽沟可适应各种弓丝尺寸，对弓丝施加轻柔约束，逐步引导进入过度阶段。
- 随着弓丝尺寸的增加，柔和的约束力产生可控的弓丝滑动，实现理想的间隙关闭和控根移动。
- 不需结扎，弓丝可有效滑动。

阶段 3



完美矫治收尾

在主动自锁阶段，Click-It将弓丝矫治信息全面精确表达，实现完美收尾。

- 通过滑动机制轻松实现间隙关闭、中线调整及牙齿微调。
- 0.022"槽沟内各种尺寸弓丝可对牙根直立和切牙转矩达到完全控制。

两分钟 更换弓丝

有关时间



使用Click-It自锁托槽专用镊子
弓丝更换简单快捷。

简单的结扎步骤

Click-It带弹簧的独特锁盖设计，使操作顺利、高效，患者较舒适—如有必要也可进行结扎。



步骤 托槽打开后，将弓丝与
弓丝槽沟对齐。

1



步骤 在托槽近远中端，用指
腹轻压弓丝。

2



步骤 听到“咔嗒”响声后确认
弓丝已正确压入槽沟，托
槽关闭。


3

[查看视频](#)




快速移除弓丝

高效的弹簧和关节轴技术，使弓丝的移除和结扎一样轻而易举。只需使用镊子轻夹托槽两端即可。

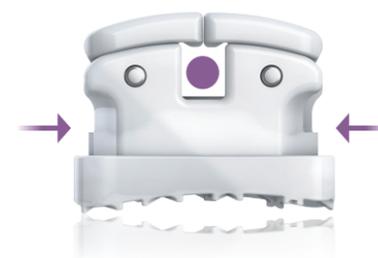

步骤 将镊子尖端放置于托槽
中间。

1

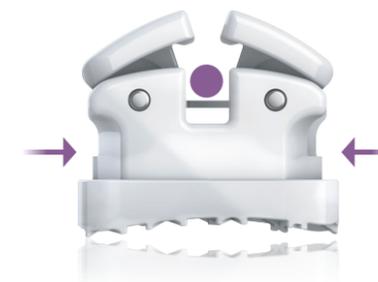

步骤 轻轻挤压，持续加力
直至托槽打开。

2



步骤 弹簧系统自动将弓丝弹
出托槽。

3

[查看视频](#)



突破性 美观隐形治疗

让您备受患者青睐

越来越多的患者希望进行隐形正畸治疗。突破性的美观设计使他们的决定更加简单。Click-It给患者不一样的治疗体验。

 个性化
牙色配比技术®

Click-It应用了独一无二的个性化牙色配比技术，可以起到完全的隐形效果—托槽呈现患者牙齿的颜色。

完全的陶瓷表面、隐藏的结扎翼及金属部件成就Click-It卓越的隐形效果。



Click-It托槽粘结于不同颜色的牙齿上。
Click-It可以完全溶入任何患者的牙色。



不同之处源于设计

与其他品牌相比，Click-It可以让您和患者对治疗更有信心。



优点

| | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|---|
| 真正隐形，无可见金属部件 | | ● | | | ● |
| 主动、互动、被动结扎 | ● | | | | ● |
| 使用简便 - 轻压弓丝激活关闭机制 | | | | ● | ● |
| 通过四壁式设计实现完全掌控 | | ● | ● | | ● |
| 即使使用最大尺寸弓丝，也能轻松打开/关闭 | | ● | ● | | ● |
| 接触点摩擦力较小，弓丝移动更高效 | | ● | | | ● |
| 口腔更易清理，无食物残留 | | | | | ● |
| 隐藏的结扎翼使托槽更美观 | | | | | ● |
| 患者舒适度更高：非单向力量打开托槽 | | | | ● | ● |

您的患者 就是我们的患者

TP正畸坚信，您的患者就是我们的患者。Click-It正是秉承了这一信条而设计，融合了突破性的美感和强大的技术优势，使患者拥有其它托槽无法企及的治疗体验。

ClickIt.TPOrtho.com



确认的声音

Click-It名称来源于弓丝置入槽沟后托槽关闭时的声音。